

Conveen® Optima

guide för utprovning

Förberedelser

Innan du applicerar Conveen Optima ska penis tvättas noggrant med ej återfettande tvål och vatten och sedan torkas ordentligt. Användning av krämer och pulver bör undvikas eftersom detta kan hindra häftan från att fungera effektivt. Trimma könshår vid behov.

Applicering

När du applicerar produkten ska inte förhuden vara tillbakadragen för att förhindra att det drar i den lösa huden. Detta gäller oomskurna män. Om du är omskuren gäller inte denna anvisning.



1. Placera Conveen Optima över ollonet (med den smala änden pekande bort från kroppen). Lämna ett mellanrum på 1–2 cm mellan ollonet och det smala utloppsröret för att möjliggöra fritt flöde av urin. Håll Conveen Optima på plats med ena handen och använd den andra för att långsamt dra ögla på dubbelstrippen bakåt (mot kroppen). Conveen Optima ska rullas ut till sin fulla längd.



2. Krama urindropsamlaren med handen runt penis så att häftan fäster ordentligt mot huden och för att försegla eventuella rynkor. Ingen extra häfta behövs.



3. Anslut den smala änden av Conveen Optima till en urinpåse genom att sätta i påsens konnektor. Urinuppsamlingsystemet är nu funktionellt.



4. Koppla bort produkten från urinuppsamlingspåsen. Avlägsna enkelt urindropsamlaren genom att försiktigt rulla av den från penis.

En bra och funktionell lösning för män med urinläckage

- Diskret förpackning
- Lätt att ta på (även med handskar)
- Enkel utrullning
- Bekväm
- Säker och hudvänlig
- Motverkar läckage



Conveen® Optima



Tips vid användning av Conveen® Optima



Använd Conveen Optima mätguide för **att välja rätt storlek** för varje person. Penis ska mätas på det bredaste stället i avslappnat tillstånd. Om storleken på penis visar sig ligga mellan två Conveen Optima-storlekar prova då den mindre först. [Be din Coloplast-representant om en kostnadsfri mätguide.](#)



För att förhindra att könshår fastnar i Conveen Optima, använd en trubbig sax för att trimma bort håret från penisroten (raka inte eftersom återväxten kan orsaka irritation). Alternativt kan du använda en pappershandduk eller en servett:

- Vik pappershandduken eller servetten och riv ett litet hål i den vikta sidans hörn.
- Vik ut och för in penis genom hålet, tryck tillbaka könshåret allt eftersom.
- Ta bort pappret/servetten när urindroppssamlaren är på plats.



Välj olika urinuppsamlingspåsar för dag- och nattbruk: en påse med mindre kapacitet för dagbruk och en påse med större kapacitet och längre slang för nattbruk (för att undvika behovet av att tömma påsen på natten och minimera risken för olyckor). Vi rekommenderar att du tömmer påsen när den är lite mer än halvfull för att säkerställa optimal dränering. Vid sängläge måste påsen placeras på en lägre nivå än urinblåsan.



Conveen Optima kan sitta som längst 24h. Om möjligt, låt huden andas under korta perioder mellan bytena.



Conveen Optima och Conveen urinuppsamlingspåsar är endast avsedda för engångsbruk och ska kastas i enlighet med lokala riktlinjer, t.ex. med vanligt hushållsavfall. Töm påsen innan du kastar den. **Spola inte ner produkten i toaletten.** Förpackningen är återvinningsbar.

Rinner urinen oregelbundet ner i urinuppsamlingspåsen?

- Penis kan vara för nära det smala utloppet på Conveen Optima, vilket förhindrar fritt flöde av urin in i påsen. Se till att det finns ett mellanrum på 1 till 2 cm mellan änden av penis och dräneringsporten på Conveen Optima.
- Se till att slangen är fäst korrekt på benet för att säkerställa att urinpåsens slang inte är böjd.
- Välj en påse med en knickfri slang för att förhindra blockering av urinflödet från naturlig rörelse.